

---

## Sistema DUROPONT

### Istruzioni per l'uso degli opachi

---

#### Duropont Silano

Duropont Silano è un sistema di adesione per tutte le masse di resine acriliche.

Produce sul metallo una naturale superficie ruvida dove applicare opachi o acrilici conferendo una maggiore ritenzione e adesione

▪ **ISTRUZIONI :**

Sabbiare la superficie metallica con biossido di allumina e vaporizzare.

Applicare sulla superficie metallica una strato sottile utilizzando un pennello.

Dopo circa 5/6 minuti il liquido si satura e quindi sciacquare con acqua la zona interessata.

Non sottoporre il liquido a temperature né a pressione.

La bottiglia di Silano liquido deve essere agitato prima dell'uso e chiuso dopo l'uso al fine di evitare la evaporazione.

**Manipolare il liquido con attenzione evitando contatti con l'epidermide**



#### Duropont Opaco

Duropont Opaco è un ottimo coprente utilizzabile su tutte le leghe dentali in particolar modo su leghe Cromo/Cobalto.

Duropont Opaco si presenta nelle seguenti versioni di colore :

**Pink, Ivory e nei 16 colori della scala VITA**

▪ **ISTRUZIONI :**

Applicare un sottile strato di Duropont opaco sulla superficie interessata in modo omogeneo utilizzando un pennello.

Qualora si desidera una consistenza più lenta, miscelare nelle desiderate proporzioni l'opaco con il suo diluente, ciò consente anche tempi più lunghi di auto polimerizzazione.

I tempi di lavorazione variano dai 3 ai 6 minuti circa.

Duropont Opaco deve essere essiccato per 10 minuti circa e cotto in pentola ad acqua ad una temperatura di 45/50° C per circa 10 minuti, meglio se sottoposto ad una pressione di 2 bar.

Le bottiglie di Duropont Opaco e Diluente per Opaco devono essere agitate prima dell'uso e chiuse dopo l'uso al fine di evitare la evaporazione.