


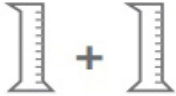


BegoForm®

Refractory die material for inlays, onlays and facets of ceramic

Istruzioni per l'uso :

- Fare attenzione al tempo di miscelazione : a 20 ° C circa per 3 minuti
- Rapporto di miscelazione: 100 g / 18 ml
- La concentrazione di liquido di miscelazione:
50% BegoForm® liquido di miscelazione / acqua distillata 50% (vedi tabella).

Concentration of mixing liquid		
Mixing ratio 100 g / 18 ml		
BegoForm®	30 g (= 1 bag)	
BegoForm® mixing liquid	2,7 ml	
Aqua dest.	2,7 ml	

- Il duplicato in BegoForm® deve essere asciugato sulla base del forno per 10 minuti
- Preriscaldare nel forno per ceramica a 650°C per 15 Minuti . Portare la temperatura a 1.000° C sotto vuoto per 10 minuti. Raffreddare ad aria
- Segnare i limiti di preparazione con la matita contorno BEGO
- Bagnare continuamente il refrattario con il liquido BegoForm®
- Procedere alla realizzazione del modellato con materiale ceramico