

# SPECIALTIES

## 3C-BOND ITALIANO



CEKA  
ATTACHMENTS  
PRECI-LINE

# 3C-BOND



**Per una ceramica naturale e vivace**



**Eccellente adesione**



**Nessuna ossidazione verdastra**

Il 3C-BOND è un agente adesivo per la cottura della ceramica su leghe non preziose e cromo-cobalto esenti di titanio.

Il 3C-BOND previene la ossidazione verdastra e migliora l'adesione con il metallo.

Da utilizzare con ceramica convenzionale.

## ISTRUZIONI D'USO

Sabbiare con  $Al_2O_3$ . Pulire con getti di vapore oppure in un bagno ad ultrasuoni, o fate bollire per 10 minuti in acqua distillata.

Il metallo deve essere completamente asciutto e deve essere manipolato unicamente con pinzette pulite.

Miscelare il 3C-BOND con acqua distillata sino ad ottenere una consistenza cremosa ed applicare un solo strato coprente sino al bordo marginale.

Il 3C-BOND essiccato non deve essere riutilizzato!

Cuocere il 3C-BOND sotto vuoto come un opaco.

Temperatura di preriscaldamento: 650 °C

Temperatura finale: 980 °C

Dopo la cottura, togliere immediatamente la struttura dal forno e fate raffreddare all'aria.

Il 3C-BOND deve essere di colore giallo tendente al giallo-oro.

Eseguire quindi le cotture dell'opaco seguendo le indicazioni del fabbricante della ceramica.



**3C-BOND**  
**# 140-3CB-20**

**20 g**



CEKA AXIAL  
PRECI-CLIX AXIAL  
PRECI-CLIX RADICULAR  
PRECI-BALL

**01.**  
AXIAL  
ATTACHMENTS

CEKA EXTRACORONAL  
CEKA ID  
PRECI-VERTIX  
PRECI-VERTIX AT  
PRECI-CLIX EC  
PRECI-SAGIX  
PRECI-52  
PRECI-TUBIX/MORTIX

**02.**  
EXTRACORONAL  
ATTACHMENTS

PRECI-BAR  
PRECI-HORIX  
PRECI-CLIP

**03.**  
PROFILE  
ATTACHMENTS

PRECI-PROFILE  
PRECI-POST  
CEKA SOL  
CEKALLOY  
CEKA SITE  
CEKA BOND  
**3C-BOND**  
PERMA-RET  
PRECI-SEP  
PLASTICWAX  
EXPANDO

**SPECIALTIES**

[WWW.CKPL.EU](http://WWW.CKPL.EU)

CEKA  
ATTACHMENTS  
PRECI-LINE



Prospectus no **275.M2-ed.A**

© Copyright ALPHADENT NV 10/2011 - BTW BE 0414.789.321 RPR Kortrijk

**ALPHADENT NV** • Textielstraat 24 8790 Waregem, Belgium  
**T**+32 56 629 100 - **F**+32 56 629 101 - **E**info@ckpl.eu

